



Tonometer prism  
**Practicle Disposable**  
**Safe Easy Sterile**  
 and fluorescein strips

Cono per tonometria  
**Pratico Monouso**  
**Sicuro Facile Sterile**  
 e strip di fluorescina



Fluorescina  
 INCLUSA

**Kit =**



CE 0476  STERILE EO

Tonometer prism & Fluorescein strips  
**EasyTon**  
 Kit =  + 

Tonometer prism and fluorescein strips  
 Cono per tonometria e strip di fluorescina

**MADE IN ITALY** 

Scarica le caratteristiche e la documentazione tecnica su [www.easyopht.com](http://www.easyopht.com)

**EasyOpht** 



**1** Remove the tonometer prism from the sterile kit being careful not to contaminate the tip.  
Rimuovere il cono dalla confezione facendo attenzione a non toccare la parte che andrà a contatto con l'occhio.



**2** Insert the tip into the tonometer with the line aligned to the zero position.  
Inserire il cono all'interno del tonometro allineando la scala graduate alla posizione zero.



**3** Open the disposable fluorescein strips, moisten and apply fluorescein to the eye.  
(We suggest our code 700100)  
Scartare la striscia di fluoresceina, umidificarla e applicarla sull'occhio da esaminare.  
(Suggeriamo l'utilizzo del nostro codice 700100)



**4** Perform the intraocular pressure measurement.  
Misurare la pressione endoculare.



**5** Dispose of the used tonometer tip.  
Non riutilizzare dopo l'uso.

Each individual EASYTON kit contains a sterile tonometer prism tip or sterile tonometer prism and two fluorescein strips. This is all that you need to complete an accurate and sterile tonometry procedure. For your economical convenience EASYTON comes in an attractive dispenser holding 100 pieces.

Una confezione di Easyton contiene un prisma conico o un prisma conico e due strisce di fluoresceina, tutto quello di cui è necessario disporre per un'accurata rilevazione tonometrica. Le confezioni di Easyton si trovano in un pratico e conveniente dispenser da 100 pezzi.

**ART. 100201 CONE + 2 FLUORESCHEIN STRIPS PACK 100PS.**

**ART. 100101 SINGLE CONE PACK 100PS.**



Ordina su [www.easyopht.com](http://www.easyopht.com)

For the best use, the slit lamp must be placed between +20° -20° degrees



## Practical Pratico

Everything you need for completely sterile tonometry in one pack.  
Tutto quello che è necessario per valutare il tono oculare.

## Easy Facile

The tonometry prism fits easily in all types of Goldmann tonometers.  
Utilizzabile su tutti i tonometri ad appianazione tipo Goldmann in commercio.

## Sterile Sterile

Risk of infection is eliminated.  
Elimina ogni rischio di infezione.

## Disposable Monouso

No need to clean the tonometer prism. Simply throw it away. Your patients will be impressed with your attention to hygiene. You will be impressed with its speed of use.  
Il prodotto è stato studiato per un solo utilizzo garantendo così la massima sicurezza per il paziente. L'utilizzatore non dovrà più preoccuparsi della sterilizzazione e rimarrà sorpreso dalla velocità di utilizzo.

## Safe Sicuro

Sterilized with ethylene oxide, the tonometer prism is safe to use with no risk of allergic reaction or infection.  
Grazie alla sterilizzazione con ossido di etilene Easyton è sicuro al 100% eliminando così reazioni allergiche o infezioni.